


「KUMORI 291コート」ご使用上の注意点

- ⚠ 警告** 通常コートと比べると優れたくもり低減性能をもっていますが、温度や湿度などの環境によってはくもることがあります。
 レンズがくもった状態でのご使用は危険ですのでご注意ください。
 レンズ表面が乾燥すればくもり低減効果は復活します。
- ⚠ 注意** 氷点下以下の環境の場合、凍結によるくもりが発生することがあります。
 高湿度な環境の場合、結露によるくもりが発生することがあります。
- ⚠ 注意** くもり低減効果は約2年です。
 使用環境や状況により前後します。
- ⚠ 警告** 反射防止コートはありませんので、レンズの表面・裏面のぎらつきが気になることがあります。
 暗い場所での運転時に、街灯やヘッドライトがレンズに映りこむことがありますのでご注意ください。
- ⊘ 禁止** 市販のくもり止め剤や薬品類は使用しないでください。
 KUMORI 291コートのくもり低減性能が低下することがあります。
- ⊘ 禁止** 次亜塩素酸水を使用しないでください。
 KUMORI291コートが破損、剥離することがあります。
- ⚠ 注意** 通常レンズと比べるとレンズにキズが入りやすいので、
 お取り扱いにご注意ください。
 「お手入れについて」をご参照ください。
- ⚠ 注意** 水またはお湯に長時間浸けますと、くもり低減性能が低下したり、カラーレンズの場合は色抜けや色調が変化することがあります。
 流水での水洗いにとどめてください。
- ⚠ 注意** 特殊なコートの構造上、使用状況によってレンズが変色することがあります。
- ⚠ 注意** 超音波洗浄は1分以内を目安に、水中で揺らしながらご使用ください。

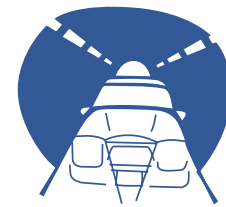

安全上のご注意

表示とその意味

⚠ 警告	誤った取り扱いをした時に、重傷、失明などの重大な結果になる可能性があることを示しています。
⚠ 注意	誤った取り扱いをした時に、障害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。
⚠	一般的な注意が必要なことを示しています。
⊘ 禁止	特定の行為の禁止を表します。