

# KUMORI 291

くもりにくい

くもり低減「KUMORI 291コート」取扱説明書

HOYAビジョンケアグループ  
お客様相談室

J13A591119-2538/2025-07

## メガネレンズのご相談は

メガネレンズのご相談は、ご購入店または下記のHOYAビジョンケアグループ「お客様相談室」までご相談ください。

〔受付:平日の午前10時から午後5時まで  
(土・日・祝日及び年末年始を除く)〕

HOYA ビジョンケアグループ お客様相談室

☎ 0120-22-4080

このたびは、弊社のKUMORI 291コートレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お子様には保護者の方がお読みいただき、ご使用上の注意が分かるようにご説明ください。

また、この取扱説明書は、お手元に大切に保管してください。

なお、レンズの基本的なお取り扱い方法につきましては、メガネレンズ取扱説明書をご参照ください。

## 「KUMORI 291コート」の特長

「KUMORI 291コート」は、メンテナンスフリーのくもりにくいレンズです。レンズ両面のくもりを抑制する特殊なコーティングにより、優れたくもり低減性能を発揮します。表面の拭き取りやすさも特長です。

## 「KUMORI 291コート」のお手入れについて

レンズに汚れや水分が付着した時は、下記の方法でお手入れしてください。

### お手入れの方法

1. 表面の汚れ、ホコリを水道水で洗い流してください
2. 柔らかいティシュペーパーで軽く押し拭きをして水分を取ってください
3. メガネ拭き(クロス)でやさしく仕上げ拭きしてください



水分が付着した状態ではクロスが滑りにくく拭きにくいので、水分を除去した上で拭いてください。汚れやホコリがひどい時に水洗いせずに乾拭きしますと、キズの原因になります。



## 「KUMORI 291コート」ご使用上の注意点

- 警告** 通常コートと比べると優れたくもり低減性能をもっていますが、温度や湿度などの環境によってはくもることがあります。  
レンズがくもった状態でのご使用は危険ですのでご注意ください。  
レンズ表面が乾燥すればくもり低減効果は復活します。
- 注意** 氷点下以下の環境の場合、凍結によるくもりが発生することがあります。  
高湿度な環境の場合、結露によるくもりが発生することがあります。
- 注意** くもり低減効果は約2年です。  
使用環境や状況により前後します。
- 警告** 反射防止コートはありませんので、レンズの表面・裏面のざらつきが気になることがあります。  
暗い場所での運転時に、街灯やヘッドライトがレンズに映りこむことがありますのでご注意ください。
- 禁止** 市販のくもり止め剤や薬品類は使用しないでください。  
KUMORI 291コートのくもり低減性能が低下することがあります。
- 禁止** 次亜塩素酸水を使用しないでください。  
KUMORI291コートが破損、剥離することがあります。
- 注意** 通常レンズと比べるとレンズにキズが入りやすいので、  
お取り扱いにご注意ください。  
「お手入れについて」をご参照ください。
- 注意** 水またはお湯に長時間浸けますと、くもり低減性能が低下したり、カラーレンズの場合は色抜けや色調が変化することがあります。  
流水での水洗いにとどめてください。
- 注意** 特殊なコートの構造上、使用状況によってレンズが変色することがあります。
- 注意** 超音波洗浄は1分以内を目安に、水中で揺らしながらご使用ください。



## 安全上のご注意

### 表示とその意味

<b>警告</b>	誤った取り扱いをした時に、重傷、失明などの重大な結果になる可能性があることを示しています。
<b>注意</b>	誤った取り扱いをした時に、障害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	一般的な注意が必要なことを示しています。
<b>禁止</b>	特定の行為の禁止を表します。